

Gel obklad 13x14cm

LU600036

NÁVOD K POUŽITÍ

Použití

- ▶ Fyzioterapie
- ▶ Sportovní medicína
- ▶ Ortopedie
- ▶ Gynekologie
- ▶ Stomatologie
- ▶ První pomoc
- ▶ Pooperační péče



Nepoužívejte v případě:

Porucha krevního oběhu, Raynaudův syndrom

Použití za studena:

Vložte do lednice nebo mrazáku (-18°C) **na přibližně 2 hodiny**. Zabalte do látky nebo tenkého ručníku.

Použití za tepla:

Vložte do horké vody (max. 80°C) **na přibližně 4 minuty**. Zabalte do látky nebo tenkého ručníku.



Upozornění

Použití při kardiovaskulárních onemocněních a jiných onemocněních (např. diabetes) pouze po konzultaci s lékařem!

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz, tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**