

# Gel obklad 12x29cm

## LU600037

NÁVOD K POUŽITÍ

### Použití

- ▶ Fyzioterapie
- ▶ Sportovní medicína
- ▶ Ortopedie
- ▶ Gynekologie
- ▶ Stomatologie
- ▶ První pomoc
- ▶ Pooperační péče



### Nepoužívejte v případě:

Porucha krevního oběhu, Raynaudův syndrom

### Použití za studena:

Vložte do lednice nebo mrazáku (-18°C) **na přibližně 2 hodiny**. Zabalte do látky nebo tenkého ručníku.

### Použití za tepla:

Vložte do horké vody (max. 80°C) **na přibližně 6 minut**. Zabalte do látky nebo tenkého ručníku.



### Upozornění

Použití při kardiovaskulárních onemocněních a jiných onemocněních (např. diabetes) pouze po konzultaci s lékařem!

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

[www.lukovshop.cz](http://www.lukovshop.cz) , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**