



Chodítko krokovací Lukov

LU600046

NÁVOD K POUŽITÍ

Technická data

Číslo výrobku: LU600046 Chodítka krokovací Lukov			
Materiál:	hliník/plasty/TPR	Složitelný na:	cca.80 x 53 x 10 cm
Barva:	stříbrná / světle šedá	8x nastavitelné:	ca. 79-97 cm
Šířka:	cca. 51,5 x 49,2 cm	Váha:	2,28 kg
Šířka mezi rukojetí:	ca. 43 cm	Maximální zatížení:	110 kg
Provozní životnost:	přibližně 5 let, v závislosti na četnosti používání		

Použití

Krokovací chodítka je zdravotnický prostředek je určen pro nácvik chůze a jako pomůcka při chůzi, především ve vnitřních prostorech. Produkt může být používán jako opěra i jako chodítka.

Indikace:

Omezená schopnost chůze, silná nejistota chůze, procvičování chůze

Kontraindikace:

Těžce narušený smysl pro rovnováhu, nedostatečná schopnost úchopu, ztráta končetin a/nebo poškození kloubů horních končetin, nedostatečné fyzické nebo duševní schopnosti používat pomůcku

Verze:

Existují různé pomůcky pro chůzi, výběr by měl být proveden po konzultaci s lékařem / terapeutem společně s odborným personálem. Výběr, montáž a návod k použití smí provádět pouze autorizovaní, vyškolení odborníci. Nejprve si vyzkoušejte, jak zacházet s vybraným chodítkem v interiéru na vhodném rovném povrchu za pomoci druhé osoby. Výrobek nepoužívejte, pokud máte porušenou, zraněnou pokožku. Výrobek musí být používán pouze jedním konkrétním pacientem.

Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce. Společnost Sundo GmbH nese odpovědnost za případné škody, riziko nese výhradně uživatel. Jakékoli závažné události vzniklé v souvislosti s tímto výrobkem musí být neprodleně nahlášeny výrobci nebo příslušnému orgánu.

Před použitím / údržbou:

Nejprve si přečtěte celý tento návod k použití a uschovejte jej až do konce životnosti výrobku. Před prvním použitím a při každém použití zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený. Zkontrolujte správné usazení šroubů a tlačítek, jakož i opotřebení gumových nástavců. V případě známek poškození nebo opotřebení se chodítka nesmí (již) používat, v takovém případě se obraťte na svého prodejce. Musí

být použity pouze originální náhradní díly, použít lez pouze náhradní gumové nástavce s ocelovými vložkami!

Čištění / dezinfekce:

K čištění nepoužívejte ostré nebo abrazivní náčiní ani čisticí prostředky. Rám čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, v případě potřeby použijte běžné jemné čisticí prostředky pro domácnost.

(Nepoužívejte mastné nebo mastné čisticí prostředky!)

V případě potřeby, lze výrobek při utírání dezinfikovat běžně dostupným dezinfekčním prostředkem bez obsahu chlóru.



Důležité: Při použití dezinfekčních prostředků je třeba dodržovat požadavky výrobce na jejich použití.

Rozložení:

Vyklopte obě boční části rukojetí směrem ven.

- ▶ Zamykací systém musí slyšitelně zaklapnout.
- ▶ Zkontrolujte zámek sklápění, boční díly se nesmí pohybovat.

Složení:

- ▶ Stiskněte zajišťovací tlačítko na horní příčce směrem dolů.
- ▶ Současně zatáhněte pravou boční část dovnitř, poté levou část.
- ▶  **Pozor:** Při skládání/rozkládání, hrozí nebezpečí sevření rukou!



Výrobek lze použít i jako pohyblivý (1) stejně jako pevný (2) chodící rám posunutím držáku svorek.

Toto nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný personál a nesmí být měněno uživatelem bez oprávnění!

Nastavení výšky:

- ▶ Zatlačte na nastavovací tlačítko (3)
- ▶ Vytáhněte teleskopickou trubku do požadované výšky.
- ▶ Nechte tlačítko opět bezpečně zaklapnout.
- ▶  **Pozor:** Zaklapnuté tlačítko musí být viditelné z otvoru v nožní trubce.
- ▶  **Důležité:** Všechny 4 nožičky musí být nastaveny do stejné výšky!

Bezpečnostní pokyny:

- ▶ Hmotnost uživatele nesmí překročit 110 kg!
- ▶ Stůjte vždy uprostřed rámu a pohybujte se dopředu uvnitř rámu. Všechny čtyři nohy chodítka musí stát bezpečně na zemi.
- ▶ Neopírejte se o rám na jedné straně, hrozí nebezpečí převrácení a pádu!
- ▶ Výrobek používejte pouze na rovném, pevném povrchu. Nerovnosti, díry nebo měkký povrch mohou vést k převrácení nebo pádu! V případě vlhkého, mokrého nebo zledovatělého povrchu hrozí zvýšené riziko uklouznutí a pádu, přizpůsobte tomu při chůzi! Chodítko používejte především v interiéru.
- ▶ Před každým použitím zkontrolujte správné usazení seřizovacích tlačítek, musí být zcela zajištěna, všechny 4 nohy musí být nastaveny do stejné výšky.
- ▶ Výškové nastavení, skládání nebo rozkládání výrobku zvyšuje riziko sevření!
- ▶ Na chodítko "UNIVERSAL" nepřipevňujte žádné předměty, tašky apod.
- ▶ Nepoužívejte výrobek jako stojan nebo sedací pomůcku, nelezte a nesedejte na příčné vzpěry!
- ▶ Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí bez dozoru.

Záruka

Dle zákonných záručních nároků.

Vyloučeno ze záruky: Poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením a opotřebením, jakož i závady, které mají pouze nepodstatný vliv na hodnotu nebo provozuschopnost přístroje. Změny technické stránky a přídatná zařízení, stejně jako nesprávná údržba, vedou ke ztrátě záruky a odpovědnosti za výrobek obecně.

Vyhrazujeme si právo provádět změny, které jsou v zájmu technického zdokonalení.

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**



Sundo Homecare GmbH, www.sundo-homecare.de
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen



Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung, Duesseldorfer Str. 24, DE-40211 Duesseldorf

