



MOPEDIA®

CHODÍTKA

RP729x-RP73x-RP74x

NÁVOD K POUŽITÍ

1. KÓDY.....	str. 3
2. ÚVOD.....	str. 3
3. ÚČEL POUŽITÍ.....	str. 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	str. 4
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	str. 4
6. OBECNÝ POPIS.....	str. 5
6.1. Nastavení výšky.....	str. 5
7. PŘED POUŽITÍM.....	str. 5
8. UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ	str. 5
9. NÁVOD NA MONTÁŽ RP729X.....	str. 6
10. NÁVOD K POUŽITÍ.....	str. 7
11. ÚDRŽBA.....	str. 9
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	str. 9
13. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	str. 9
14. TECHNICKÉ PARAMETRY.....	str. 10
15. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str. 11
16. ZÁRUKA.....	str. 12
17. OPRAVY.....	str. 13
18. NÁHRADNÍ DÍLY.....	str. 13
19. OSVOBUZUJÍCÍ KLAUZULE.....	str. 13

Zdravotnický prostředek třídy I

D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn

1. KÓDY

Chodítka čtyřbodová

RP729M-L	Pevné chodítko s nastavitelnou výškou
RP730M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou
RP747	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, dvojitá rukojeď
R9749M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou a dvojitou funkcí

Chodítka se dvěma otočnými kolečky a dvěma body

RP734	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 otočná kolečka, 2 body
RP735S-M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 pevná kolečka, 2 body
RP737	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 pevná kolečka, 2 body

Chodítka se čtyřmi kolečky

RP733S-M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 4 otočná kolečka
RP738	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 samozamykací kolečka, 2 otočná kolečka
RP741	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 otočná kolečka, 2 s brzdami
RP748	Odnímatelné chodítko s nastavitelnou výškou, 2 otočná kolečka s brzdou a 2 otočná kolečka
RP742	Skládací chodítko s ruční brzdou
RP743	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 samozamykací dvojitá kolečka, 2 otočná kolečka

2. ÚVOD

Děkujeme za zakoupení chodítka pro seniory značky MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě dotazů se obraťte na svého prodejce.

3. ÚČEL POUŽITÍ

Chodítko slouží jako opora při chůzi osobám s pohybovými obtížemi.



UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavatelé nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodáváný, který patří do sortimentu pomůcek pro chůzi, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Příslušná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Příslušná zařízení NEJSOU PŘEDMĚTEM KLINICKÝCH TESTŮ
4. Příslušná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Příslušná zařízení patří do třídy I° .
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE příslušná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ



POZNÁMKA:

Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.
- Poradte se s terapeutem, abyste určili správné nastavení a použití chodítka.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.
- Uživatel a/nebo pacient nahlásí jakoukoli vážnou nehodu, která se vyskytne v souvislosti s použitím chodítka, výrobci nebo příslušným státním autoritám.

6. OBECNÝ POPIS

Chodítka MOPEDIA jsou vyrobená z anodizovaného hliníku, mají rukojeti s polstrováním, protiskluzové pryžové hroty a/nebo otočná kolečka a/nebo pevná kolečka. Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm. Slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy. Chodítka poskytují podporu osobám se sníženou hybností dolních končetin. Poskytují podporu v situacích slabosti a/nebo ochrnutí dolních končetin. Pomáhá přenést na paže část váhy člověka, kde je požadováno omezení zátěže na jednu nebo obě dolní končetiny.

6.1. Nastavení výšky



Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko a posuňte hůl do požadované výšky.

Všechny 4 nohy nastavte na shodnou pozici a zkontrolujte jejich zajištění (všechny západky musí zacvaknout).

7. PŘED POUŽITÍM

- Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, zda fungují brzdy – u modelů, kterých jsou součástí
- Pokud zjistíte závadu, chodítka nepoužívejte a obraťte se na prodejce pro opravu.
- Zkontrolujte, zda není rám poškozený, aby bylo zaručeno bezpečné používání.
- Uživatelé musí užívat chodítka pouze na chodníku pro chodce nikoliv na rušné silnici.
- Věnujte zvýšenou pozornost možnosti úrazu při zachycení, prsty se nesmí dostat mezi pohyblivé části chodítka. Věnujte pozornost při složení chodítka.

8. UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

Toto zařízení poskytuje větší stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi. V žádném případě nemůže být chodítka používána osobami s viditelně sníženou schopností pohybu rukou a lidmi s problémy s rovnováhou. Chodítka pro seniory může být používáno jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Doporučujeme ho používat pouze na takovém povrchu, na němž se dotýkají země všechny čtyři nohy.

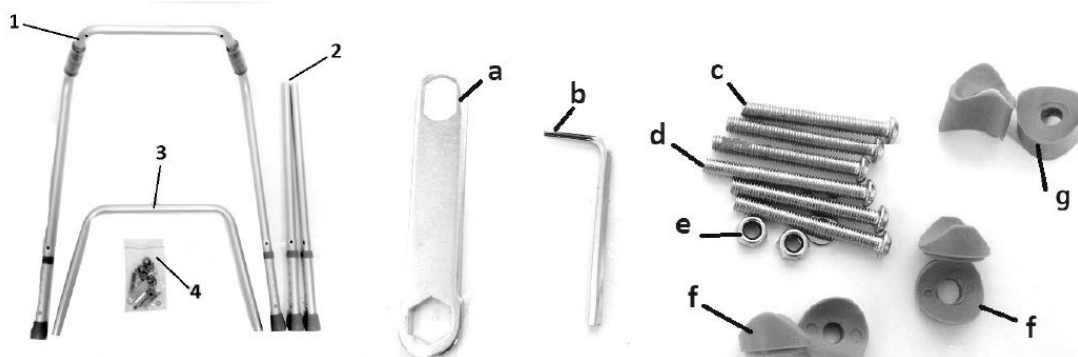
Nemělo by být používáno na kamenitém terénu či šikmých plochách, neboť tím klesá stabilita. Chodítko není určeno k přepravě osob nebo jiného materiálu.

- Dbejte zvýšené opatrnosti na klzkém nebo mokrém povrchu.
- Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou na štítku u výrobku a v sekci technické vlastnosti v této příručce.
- Bez pomoci nepoužívejte chodítko na svahu/kopci s více než 10% sklonem.
- Nenechávejte produkt dlouho v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte pevnost a stabilitu a zda jsou protiskluzové nástavce v dobrém stavu. Vyměňte je při opotřebení.
- V případě pochybností o použití nebo úpravě se obraťte na svého prodejce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.


9. NÁVOD NA MONTÁŽ RP729X

Seznam dílů:

- 1) Hlavní rám (1ks)
- 2) Nohy (2ks)
- 3) Zahnutá trubka (1ks)
- 4) Montážní sada (1ks)



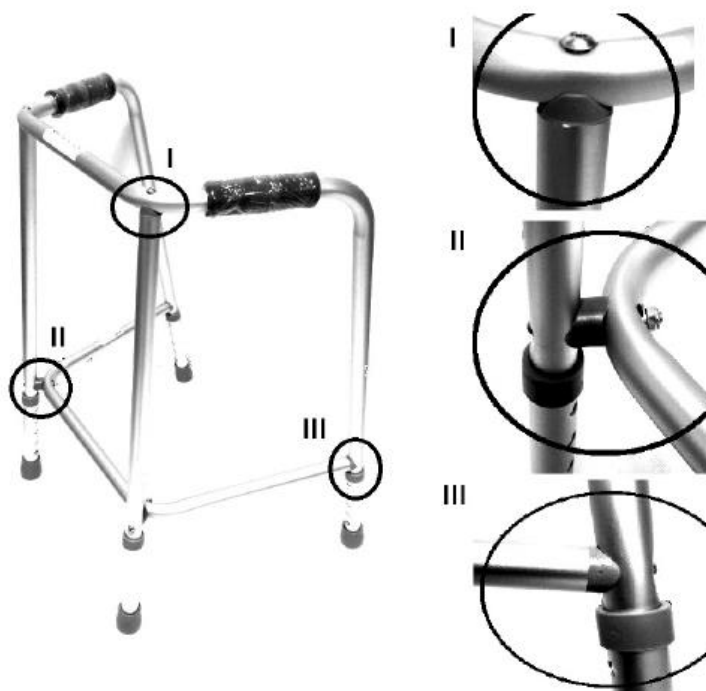- a) Vezměte hlavní rám (1), otevřete montážní sadu a začněte montáž
- b) Namontujte na hlavní rám (1): nohy (2), podložky (f) a krátké šrouby (c). Šrouby zcela neutahujte.
- c) Namontujte na přední stranu rámu (1): zahnutou trubku (2) se sedlovými podložkami (g), dlouhé šrouby (d), matice a podložky (e). Šrouby zcela neutahujte.
- d) Namontujte na hlavní rám (1): zahnutou trubku (3), podložky (f) a krátké šrouby (c). Šrouby zcela neutahujte.
- e) Utáhněte všechny šrouby, chodítko je nyní připraveno k použití (viz. obrázek níže).




10. NÁVOD NA POUŽITÍ



POZNÁMKA:

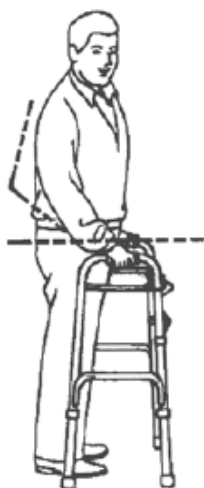Viz. bezpečnostní pokyny v této příručce. Použijte chodítko jako pomůcku při chůzi. Pro použití použijte obě rukojeti a tlačte chodítko dopředu, čímž získáte podporu pro pohodlnou a spolehlivou chůzi.



Při ruce natažené dolů by se madlo chodítka mělo nacházet ve výšce zápěstí. Pokud položíte ruku na rukojeť, měli byste mít loket ohnutý do úhlu zhruba 20-30 stupňů.



VAROVÁNÍ!

Dávejte pozor na prodlužovací kabely, mokré povrchy, koberečky, hračky či nepořádek, nábytek, dveře a prahy a na mezery v podlaze. Nepoužívejte chodítko na schodech či eskalátorech.



Ubezpečte se, že chodítko je stabilní. Opřete se rukama do rukojeti vozíku a stoupněte si a postupně a opatrně, jednu ruku po druhé, se přesuňte nad chodítko.



VAROVÁNÍ!

Pro první přesun a kroky požádejte o pomoc asistenta.



- a) Pro chodítka s pevnými špičkami: pro chůzi chodítko zvedněte a položte do pohodlné vzdálenosti před sebe, Ujistěte se, že všechny čtyři nohy chodítka jsou na podlaze. Chodte opatrně krok za krokem.
- b) Pro chodítka s kolečky: pro chůzi chodítko pomalu tlačte před vámi. Ujistěte se, že všechny čtyři nohy chodítka jsou na podlaze. Chodte opatrně krok za krokem.



POZNÁMKA:

Chodítko musí být vždy uchopeno za rukojeti.



UPOZORNĚNÍ!

Chodítko nedávejte/netlačte do velké vzdálenosti od těla. Hrozí riziko pádu a nedostatečné opory.

11. ÚDRŽBA

Produkty řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným servisem každé 2 roky. Pravidelná kontrola znamená kontrolu následujících částí:

- Nosná konstrukce a spojovací části
- Kolečka a brzdy (u modelů, kterých se to týká)
- Sváry
- Kontrola protiskluzových nástavců (u modelů, kterých se to týká)

V případě opravy je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím chodítko dobře osušte. Používejte vodu při teplotě nejvýše 30°C. Nepoužívejte tlakovou vodu nebo parní trysky.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.



POZNÁMKA:








V žádném případě nepoužívejte na čištění produktu kyseliny nebo jiné agresivní látky, rozpouštědla a látky s přídavkem acetonu či ředidla.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

14. TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	Max nosnost	Nastavitelná výška po 2,5 cm	Pevné nohy /kolečka	Rozměry *	Rozměry**
RP729M	110 Kg	Od 76 do 86 cm	4 pevné nohy	 43,5 cm	 46 cm
RP729L		Od 86 do 96 cm		 45 cm	 47 cm
RP730M	110 Kg	Od 77 do 87 cm	4 pevné nohy	 48 cm	 50 cm
RP730L		Od 83 do 101 cm		 49 cm	 53 cm
RP749M	130 kg	Od 77,5 do 87,5 cm	4 pevné nohy	 47,5 cm	 49 cm
RP749L		Od 83,5 do 101,5 cm		 47,5 cm	 52 cm
RP747	130 kg	od 71 do 89 cm	4 pevné nohy	 51 cm	 52 cm
RP735S	130 kg	Od 68,5 do 78,5 cm	2 kolečka a 2 pevné nohy	 46 cm	 48 cm
RP735M	130 kg	Od 76 do 86 cm	2 kolečka a 2 pevné nohy	 48 cm	 50 cm
RP735L	130 kg	Od 83 do 101 cm	2 kolečka a 2 pevné nohy	 49,5 cm	 53,5 cm
RP737	130 kg	Od 84 do 102 cm	2 kolečka a 2 pevné nohy	 53 cm	 57 cm
RP734	130 kg	Od 84 do 102 cm	2 kolečka a 2 pevné nohy	 50 cm	 54 cm

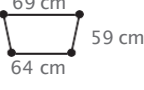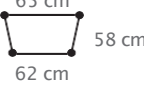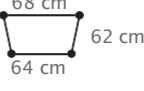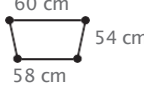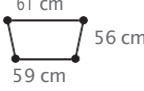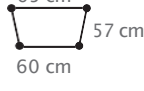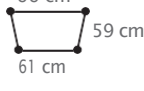
Codes	Max user's weight	Adjustable height every 2,5 cm	Tips/castors	Base*	Base**
RP738	130 kg	Od 84 do 102 cm	4 kolečka		
RP733S	130 kg	Od 70 do 80 cm	4 kolečka		
RP733M	130 kg	Od 78 do 88 cm	4 kolečka		
RP733L	130 kg	Od 84 do 102 cm	4 kolečka		
RP741	100 kg	Od 86 do 96 cm	4 kolečka 2 s brzdami		
RP743	120 kg	Od 85 do 103 cm	4 kolečka 2 kluzné brzdy		
RP742	130 kg	Od 86 do 103 cm	4 kolečka s brzdami		
RP748	130 kg	Od 77 do 92 cm	4 kolečka s brzdami		

*Rozměry naměřené při nejnižší výšce nastavení.


**Rozměry naměřené při nevyšší výšce nastavení

Pozn. Tolerance ± 1 cm

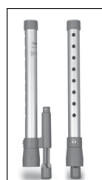15. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ




RV 7052
Nožní pár
bez koleček

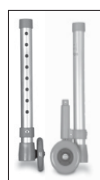


RV7053
Nožní pár
s kolečky





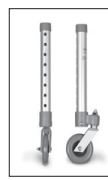
**RV7035D
RV7053G**
Dvojitá
kolečka
s kluznými
brzdami
Ø 10 cm
pár



**RV7054-5
RV7054-8**
Otočná
kolečka
5 nebo 8
poloh
Ø 7 cm
pár

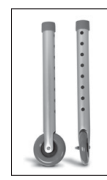

**RV7055-5
RV7055-8**
Pevná kolečka
5 nebo 8
poloh
Ø 7 cm
pár

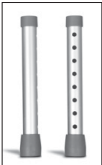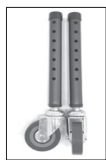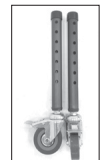	RV7056-5 RV7056-8 Náhradní nožní pár 5 nebo 8 Poloh		RV70515 Otočná kolečka 5 poloh Ø 8 cm pár		RV7051F Otočná kolečka s brzdami 5 poloh Ø 8 cm pár		RV7121-8 Otočná kolečka 8 poloh Ø 10 cm pár		RVP7154-8 Otočná kolečka 8 poloh Ø 12 cm pár
	RV7155-8 Pevná kolečka 8 poloh Ø 12 cm pár		RV7015 Otočná kolečka Ø 10 cm pár pro RP748		RV7016 Otočná kolečka s brzdami Ø 10 cm pár pro RP748		RV7035 Gumové nástavce pár pro RP729		RV7030 Gumové nástavce šedé pár Ø 28 cm
	RV7031 Gumové Nástavce Černé pár Ø 28 cm		RV7045 Koš pro chodítka RP743-749		RV7046 Koš pro chodítka RP742		RV7045N Koš pro chodítka		
	RV7114 Anti brachiální podpěra		RP758 Sedátko pro RP748						

16. ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou.

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za poškození a vady výrobku v případě: přírodních katastrof, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené napájením (je-li k dispozici), použití části nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neautorizované úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

17. OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

19. OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající z náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upravovány.

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**