



## Stolička do sprchy

### LU600145

(0806505i)

#### NÁVOD K POUŽITÍ

##### POUŽITÍ

Stolička do sprchy umožňuje uživateli větší nezávislost při každodenní osobní hygieně ve sprše, snižuje svalovou únavu způsobenou stáním a snižuje riziko uklouznutí a zranění. Protiskluzové gumové nožičky zajišťují přilnavost k podlaze a verze dodávané s výškově nastavitelnými nohama umožňují uživateli snadno měnit celkovou výšku podle jeho požadavků. Kromě toho lze stoličku do sprchy s přizpůsobenou výškou používat s různým nastavením délky mezi přední a zadní nohou. Zejména přední nohy mohou být nižší než zadní: to umožňuje uživateli zachovat správnější držení těla při sprchování a také usnadnit postupy při stání a sezení.

Opěrka zad, pokud je u konkrétního typu výrobku k dispozici, poskytuje dodatečnou bezpečnost a pohodlí. Stoličku do sprchy lze díky její nízké hmotnosti snadno přemísťovat.

##### INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Je určena starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mají potíže s udržení polohy ve stoje během sprchování v rámci každodenní osobní hygieny. Od uživatele se vyžaduje samostatnost při udržování rovnováhy během sezení a stání a také přiměřená schopnost udržet se vsedě.



Stolička do sprchy se nesmí používat, pokud má uživatel problémy spojené s poruchami rovnováhy nebo vnímání.

##### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedačka správně sestavena ve stabilní poloze.
- Sedačku lze používat pouze na povrchu bez překážek.
- Při montáži přísně dodržujte to, co je uvedeno v návodu k použití.
- Během montáže nebo sestavování se může zvýšit riziko poranění prstů.

- Na sedačce se nehoupejte, mohlo by dojít ke sklouznutí, převrácení nebo sesednutí nohou. Pokud sprchovou židli používáte, vždy držte sedátko na 4 nožičkách.
- Sedátko a jeho součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte sprchové sedátko, pokud je poškozené nebo jakkoli upravené. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit výkony a bezpečnost zařízení.
- Po použití je třeba sprchové sedátko vyjmout ze sprchové vaničky, aby nepřekáželo.
- Nepoužívejte sprchové sedátko k jinému účelu, než pro který je určeno.
- Sprchové sedátko se nesmí skladovat venku.

### ÚDRŽBA:

Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard stoličky do sprchy, měl by uživatel tyto postupy provádět před každým použitím.

Uživatel se musí ujistit o strukturální integritě zařízení a jeho součástí. Při čištění a sanitačních postupech postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Je třeba používat rukavice.
2. Předtím odstraňte zjevné nečistoty, abyste mohli pokračovat v co nejpřesnější dezinfekci.
3. Pro postup čištění použijte vodu nebo jemný čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.

### POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před opětovným použitím jinými uživateli musí být výrobek správně vyčištěn a dezinfikován a musí být zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

### SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Předem se informujte na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.

### HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Odpovídáme výhradně za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení patří do třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně uvedených norem a právních předpisů.

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43  
[www.lukovshop.cz](http://www.lukovshop.cz), tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**

## STOLIČKA DO SPRCHY

MAX NOSTNOST

0804461, 0806505i	BEZ OPĚRADLA	100 Kg
0804454, 0806064i	S OPĚRADLEM	100 Kg

K montáži není potřeba žádné nářadí.


1. V balení výrobku "Stolička do sprchy bez opěradla" se nenachází část opěradla



2. Umístěte plastovou část sedadla vzhůru nohama, jak je znázorněno na fotografii 2.




3. Umístěte kovovou část nohou, zkřížte je jako na fotografii 3, vložte krátký šroub jako na fotografii 4 a lehce zašroubujte.

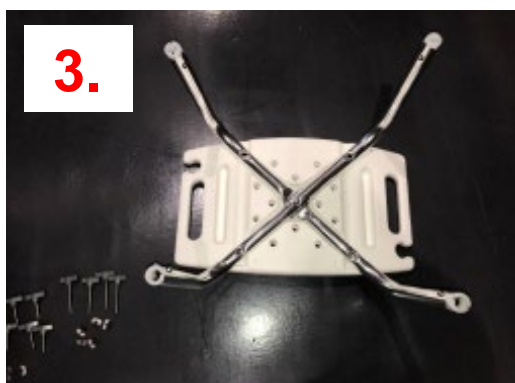

4. Nainstalujte nastavitelnou kovovou část nohy s gumovou špičkou stisknutím tlačítka podle fotografie 5.

5.

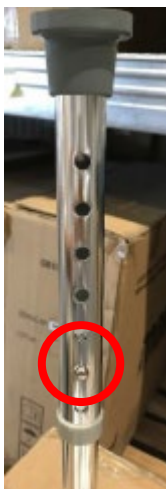


6.




5. Pro 0804454 a 0806064i: Vložte kovovou část opěradla, jak je uvedeno na fotografii 6, vložte dlouhé šrouby, jak je uvedeno na fotografii 7, a poté je mírně utáhněte. Opakujte pro druhou stranu.

6. Po instalaci všech šroubů sedadla, kterých je celkem 5, všechny dobře utáhněte, aby byly zajištěny.

7.

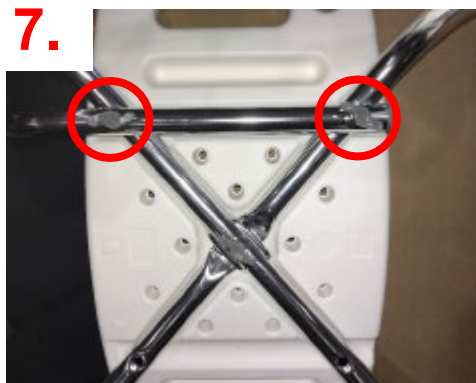

8.

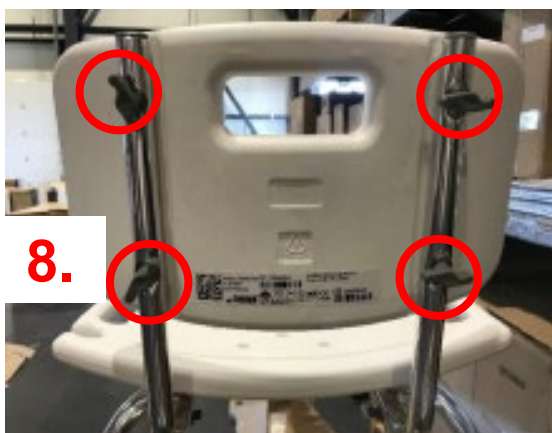

7. Pro 0804454 a 0806064i: Vložte plastovou část opěradla, jak je znázorněno na fotografii 8, vložte krátké šrouby a mírně je utáhněte. Po instalaci všech 4 šroubů je všechny utáhněte, aby byly zajištěny.

**Rozměry:** D: 50cm  
Š: 30cm  
V: 32cm

9.

