









Chodítko s předloketní oporou

LU600189

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS VÝROBKU A TECHNICKÉ PARAMETRY

	LU600189
RÁM	HLINÍK
RÁM	SKLÁDACÍ
BARVA	METALICKÁ ŠEDÁ
RUKOJETI	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ. 6 POLOH
BRZDY	BEZPEČNOSTNÍ BRZDY NA RUKOJETÍCH, KTERÉ SE MOHOU ZABLOKOVAT
ZADNÍ KOLA	8" MASIVNÍ Z PVC
PŘEDNÍ KOLA	8" MASIVNÍ Z PVC
SEDÁTKO PRO UŽIVATELE	ANO - STANDART
DRŽÁK	ANO - STANDART
MAX ZATÍŽENÍ	136 Kg
MAX NOSNOST TAŠKY	5 Kg

					
53cm	63cm	60cm	102-114cm	8 Kg	136Kg

2. POUŽITÍ

Chodítko je určeno pro podporu a zlepšení omezené schopnosti chůze. Schopnost chůze uživatele musí být dostatečná pro odchod z domova, pro běžné denní činnosti a pro účast ve společenském životě, aniž by ohrožoval sebe nebo ostatní.

Chodítko je určen k podpoře osoby při chůzi pro vnitřní i venkovní použití. Dále je chodítko určeno k přenášení nákladu buď ve speciálně navrženém koši, na podnosu nebo v tašce.

Maximální zatížení výrobku uvedené v bodě 1 Popis výrobku a technické parametry.

Toto hmotnostní omezení zahrnuje hmotnost uživatele a obsah koše nebo tašky.

3. MONTÁŽ:

Chodítka se dodávají smontovaná a připravená k použití.

Je možné, že bude nutné sestavit část rukojeti.

Výrobek, který držíte v ruce, se může lišit od výrobku na následujících fotografiích. Postup montáže je však podobný.

Rozložte chodítko

1. Držte výrobek a ujistěte se, že jsou všechna čtyři kola stabilně na zemi.
2. Zatlačte ocelovou tyč směrem dolů, abyste výrobek rozložili.
3. Když jsou boční vzpěry v jedné přímce, je výrobek zcela rozložen.
4. Spusťte sedačku do správné polohy.

Skládání chodítka

1. Sklopte sedadlo.
2. Zvedněte ocelovou tyč nebo boční výztuhy směrem nahoru a výrobek složte.

Montáž tašky:

1. Umístěte popruh brašny na háček na předním konci tyče sedadla směrem ven. Po jeho upevnění jej zajistěte pomocí pásků se suchým zipem.


Nastavení výšky rukojeti

1. Zasuňte rukojeti do speciálních zářezů. Spojte trubku rukojeti s trubkou hlavního rámu. Stisknutím tlačítka.
2. Zajistěte rukojeti, do požadované výšky, dotažením podložky nebo rukojeti (v závislosti na modelu).



Použití ruční brzdy

1. Zatažením za obě brzdové rukojeti A směrem nahoru aktivujete provozní brzdy.
3. Parkovací brzdy zatáhnete úplným stisknutím brzdových rukojetí A směrem dolů. Uslyšíte zvuk, který signalizuje, že brzda je ve správné poloze.
4. Chcete-li parkovací brzdy uvolnit, zatáhněte za brzdové rukojeti směrem nahoru.
5. V případě špatného účinku brzd musí seřízení brzd provést kvalifikovaný personál.

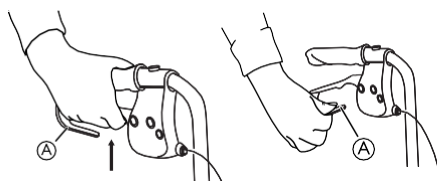

4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Tento návod MUSÍ být předán uživateli výrobku.
- Pokud si tento návod k použití nepřečtete, raději tento výrobek ani jiný dostupný díl nepoužívejte. Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím výrobku na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k jeho poškození.
- PŘEČTĚTE si tento návod k použití a UCHOVÁVEJTE si jej pro budoucí použití.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepřekračujte maximální zatížení.
- Zvláštní opatrnost je vždy nutná tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit zachycení končetin a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat výrobek za žádné odnímatelné části.



DŮLEŽITÉ!

Konstrukce tohoto výrobku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Uživatelé však mohou být ohroženi nevhodným používáním výrobku. V zájmu vlastní bezpečnosti je nutné dodržovat následující pravidla. Nespecifické nebo nesprávné seřizovací práce mohou zvýšit riziko nehody.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli snáze viditelní.
- Buďte opatrní během prvního použití tohoto výrobku.
- Výrobek používejte na rovném terénu i do kopce a z kopce.
- Nepoužívejte na mokřem, zledovatělém nebo mastném povrchu.
- Nepoužívejte jej na silnicích nebo dálnicích.
- Nejezděte s chodítkem po schodech nahoru ani dolů.
- Nepoužívejte chodítko na pohyblivých schodech.
- Nepoužívejte jiné než společnosti MOBIAK schválené neautorizované díly, příslušenství nebo adaptéry.
- Nestůjте na výrobku.
- Náklad smí být přepravován pouze v koši nebo v tašce. Buďte opatrní při přepravě těžkého nákladu, maximální zatížení v koši nebo v tašce je 5 kg.

5. PŘED POUŽITÍM:

1. Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Že v rámu nejsou žádné praskliny nebo zlomeniny).
2. Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
3. Zkontrolujte, zda je rám zcela otevřený. Zda je výrobek v úplném vysunutí a zda je v této poloze zajištěn.
4. Zkontrolujte, zda brzda funguje správně.
5. Zkontrolujte, zda jsou šrouby a knoflíky bezpečně upevněny a v dobrém stavu.
6. Vždy zkontrolujte stav opotřebení mechanických částí, aby bylo zajištěno naprosto bezpečné používání výrobku pro osoby a předměty.
7. Pokud jsou k dispozici rychloupínací osy, zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny.
8. Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení předních a zadních kol.
9. Zkontrolujte pneumatiky, tlak v pneumatikách (pokud je potřeba) a zámky kol (brzdy). Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a zámky kol příliš dlouhá, brzdy nebudou správně fungovat.
10. Zkontrolujte, zda jsou kola zbavena vlasů, žmolků a jiných nečistot.
11. Nedoporučujeme, aby byl výrobek vydán komukoli bez předchozího úplného posouzení jeho specifických potřeb. Je důležité, aby uživatel dostal od výrobku potřebnou podporu předepsanou kvalifikovaným odborníkem. Je to jak pro bezpečnost uživatele, tak i pro jeho zotavení.




UPOZORNĚNÍ

Následující metody musí být použity pouze u zkušených pacientů. Pokud nejste zkušení, nechte si pomoci od ošetřujícího personálu! Ke složení nebo rozložení chodítka použijte madla nebo tlačítko (pokud je k dispozici)


CHŮZE S CHODÍTKEM:

1. Umístěte výrobek co nejbližší k sobě.
2. Udělejte krok směrem k němu, přičemž se opírejte o madla.

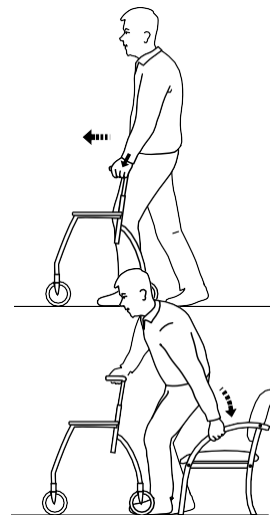

POSAZOVÁNÍ SE NA ŽIDLI S VYUŽITÍM CHODÍTKA JAKO OPORY:

1. Postavte se před židli s chodítkem, zadní část nohou by se měla dotýkat židle.
2. Zapněte parkovací brzdy do zabrzdněné polohy.
3. Položte ruce na područky židle, mírně se předkloňte a opatrně se posaďte.

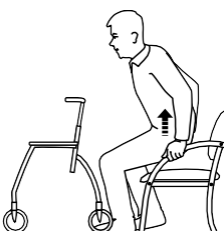

VSTÁVÁNÍ ZE ŽIDLE POMOCÍ CHODÍTKA:

1. Zapněte parkovací brzdy do zabrzdněné polohy.
2. Chodítko postavte před sebe, jako oporu použijte područky židle a opatrně se zvedněte do stoje.
3. Po ustálení ve stojné poloze přeneste ruce do rukojetí chodítka.
4. Vypněte parkovací brzdy a vykročte.

DALŠÍ POKYNY:

1. Vyhýbejte se schodům nebo překážkám, jinak požádejte o pomoc obsluhu.
2. Uživatelé by neměli výrobek používat, pokud používají jakýkoli dopravní prostředek.
3. Výrobek má na kolech brzdu, která by měla být zajištěna, když se nepohybuje.
4. NEDOTÝKEJTE se pohyblivých částí při pohybu, HROZÍ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelná kontrola a inspekce výrobku pomůže zachovat jeho životnost a účinnost.
- Často čistěte jednotlivé části chodítka.
- Na povrchy, které je třeba čistit, používejte pouze hadřík a jemné mýdlo.
- K čištění koleček použijte jiný čistý a vlhký hadřík nebo kartáč (ale ne drátěný kartáč!).
- Kola čistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Věnujte pozornost sušení kol. je nebezpečné používat chodítka s mokřými koly.
- Poté použijte čistý hadřík a před použitím výrobek dobře osušte.
- NENECHÁVEJTE chodítka mokřá.
- Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný, jemný dezinfekční prostředek ošetřením všech běžně přístupných povrchů.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady ani rozpouštědla.



DŮLEŽITÉ!

Nebezpečí koroze, chodítka nesmí být dlouhodobě skladována venku ve vlhkém prostředí nebo ve vlhkém prostředí.



POZOR (!):

- V případě poškození nebo poruchy výrobku NEPOUŽÍVEJTE výrobek a obraťte se na autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost MOBIAK S.A. odmítá veškerou odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Společnost MOBIAK S.A si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.
- Na výrobcích je možná odchylka měření $\pm 3 \%$.



6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš výrobek je třeba vyměnit nebo že vám již nevyhovuje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním veřejným odpadem (to je také smyslem zobrazené recyklační značky).
- 2) Obráťte se na orgány veřejné správy, které vás poučí o recyklačních střediscích, kam je třeba váš výrobek odevzdat.
- 3) Správná likvidace vašeho výrobku napomáhá ochraně životního prostředí i recyklaci součástí výrobku.

7. HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jsme výhradně odpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení patří do třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně i normy a uvedených právních předpisů.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEZAHRNÚJE škody vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze výrobku.

NEZAHRNÚJE také díly, které se mohou během používání nebo v průběhu času opotřebovat, jako je čalounění, kola, brzdy nebo jiné plastové díly.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s dodávkami (v příslušných případech) & dopravci.

Záruka se nevztahuje na žádný servisní nebo náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem výrobku. Náklady na dopravu zboží v záruce hradí uživatel - zákazník nebo prodejce.



















Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**

POPIS SYMBOLŮ

	LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ		CE ZNAČKA
	VÝROBCE		DATUM VÝROBY
	ČÍSLO VÝROBKU		PŘED POUŽITÍM ČTĚTE MANUÁL
	SÉRIOVÉ ČÍSLO		NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE BALENÍ POŠKOZENÉ
	ČÍSLO ŠARŽE		TOUTO STRANOU NAHORU
	UNIKÁTNÍ IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ		CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
	UDRŽUJTE V SUCHU		VÝŠKA STOHOVÁNÍ
	ZACHÁZET OPATRNĚ		KŘEHKÉ
	POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ		ELEKTROZAŘÍZENÍ