



Bariatrické toaletní křeslo

LU600190

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POUŽITÍ

Bariatrické toaletní křeslo mohou využít osoby s omezenou pohyblivostí, které nemohou chodit na toaletu v domácnosti. Křeslo bez nádoby je možné použít i jako pomůcku na záchodové míse.

Určeno pouze pro použití v interiéru.

Výrobek nepoužívejte, pokud máte vážné problémy s rovnováhou a nejste schopni zůstat sedět.

2. SPECIFIKACE

MAX HMOTNOST UŽIVATELE:	
LU600190	225 Kg

59cm	46cm	70cm	49-66cm	9Kg	225Kg

- S OPĚRADLEM
- SE SKLOPNÝMI PODRUČKAMI
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

3. OBSAH BALENÍ

Uvnitř balení se nachází hlavní rám výrobku, opěradlo a nádoba, jak je znázorněno na fotografiích níže.




4. MONTÁŽ

Výrobek se dodává smontovaný a připravený k použití. Možná bude nutné sestavit sedadlo s opěradlem. Výrobek, který držíte v ruce, se může lišit od výrobku na následujících fotografiích. Postup montáže je však podobný. K montáži není potřeba žádné nářadí.

- Chcete-li nainstalovat opěradlo na sedadlo, zasuňte současně trubky opěradla do speciálních drážek na sedadle, dokud nezapadnou na místo.



- Chcete-li sklopit loketní opěrku, stiskněte bezpečnostní páčku a zatlačte ji dolů.

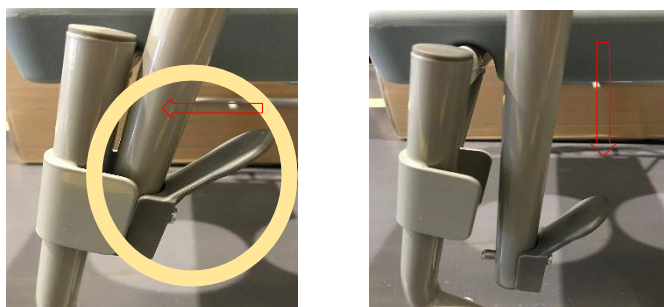

- Zepředu vložte plastovou nádobu do drážek a zatlačte ji dovnitř až pod sedadlo.



5. ÚDRŽBA

Pro zajištění bezpečného používání a odpovídajícího hygienického standardu by měl uživatel před každým použitím provést tyto postupy.

Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti přístroje a funkčnosti jeho součástí. Při čištění a hygienických postupech postupujte podle níže uvedených kroků:

- Je třeba používat rukavice.
- Předtím odstraňte zjevné nečistoty, abyste mohli pokračovat v co nejpřesnější dezinfekci.
- Pro postup čištění použijte vodu nebo jemný čisticí prostředek.
- Otřete suchým a čistým hadříkem.
- Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný, jemný dezinfekční prostředek.
- Záchodovou nádobu vyčistěte ihned po použití. Zpočátku ji opláchněte teplou vodou. Poté použijte měkký hadřík napuštěný jemným čisticím prostředkem nebo antiseptickým roztokem. Otřete čistým měkkým hadříkem.
- POZOR: Nepoužívejte kyselé a žíravé roztoky.



UPOZORNĚNÍ!

- V případě poškození nebo poruchy výrobku **NEPOUŽÍVEJTE** výrobek a obraťte se na autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Pokud si nepřečtete tuto uživatelskou příručku, raději tento výrobek ani jiný dostupný díl nepoužívejte.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Společnost MOBIAK S.A si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.
- Existuje odchylka $\pm 3\%$. Odchylka u rozměrů výrobků.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Uložte tento dokument pro budoucí použití.
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti děti, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Zvláštní opatrnost je vždy nutná tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit zachycení končetin a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat výrobek za žádné odnímatelné části
- Chraňte výrobek před poškrábáním, pořezáním a propíchnutím.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek správně sestaven ve stabilní poloze.
- Výrobek lze používat pouze na povrchu bez překážek.
- Při montáži striktně dodržujte to, co je uvedeno v návodu k použití.

- Během montáže nebo sestavování se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Nehoupejte se na výrobku. Při používání výrobku musí být sedačka vždy na jejích 4 nohách.
- Výrobek a jeho součásti nijak neupravujte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo jakkoli upravený. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit výkony a bezpečnost výrobku.
- Po použití je třeba výrobek vyjmout ze sprchové vaničky, aby nepřekážel.
- Nepoužívejte výrobek k jinému než určenému účelu.
- Výrobek nesmí být skladován ve venkovním prostředí.



- **Neumísťujte ani neodstraňujte nádobu, když pacient sedí na křesle: hrozí vysoké riziko poranění!**

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš výrobek je třeba vyměnit nebo že vám již nevyhovuje, zvažte ochranu životního prostředí:

- Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním veřejným odpadem.
- Obraťte se na orgány veřejné správy, které vás poučí o recyklačních střediscích, kam je třeba váš výrobek odevzdat.
- Správná likvidace vašeho výrobku napomáhá ochraně životního prostředí i recyklaci součástí výrobků.

HLÁŠENÍ NEHOD

Pokud došlo k závažné nehodě týkající se tohoto výrobku, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese: mobiakcarequality@mobiak.com

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jsme výhradně odpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení patří do třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně uvedených norem a právních předpisů.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data nákupu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEZAHRNÚJE škody vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze výrobku.

Rovněž se NEVZTAHUJE na díly, které se mohou během používání nebo v průběhu času opotřebovat. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (v příslušných případech), dopravci.

Žádný servis ani náhradní díl se neuplatňuje, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem výrobku. Náklady na dopravu zboží v záruce hradí koncový uživatel - zákazník nebo prodejce.


















Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**

POPIS SYMBOLŮ

	LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ		CE ZNAČKA
	VÝROBCE		DATUM VÝROBY
	ČÍSLO VÝROBKU		PŘED POUŽITÍM ČTĚTE MANUÁL
	SÉRIOVÉ ČÍSLO		NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE BALENÍ POŠKOZENÉ
	ČÍSLO ŠARŽE		TOUTO STRANOU NAHORU
	UNIKÁTNÍ IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ		CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
	UDRŽUJTE V SUCHU		VÝŠKA STOHOVÁNÍ
	ZACHÁZET OPATRNĚ		KŘEHKÉ
	POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ		ELEKTROZAŘÍZENÍ