



Evakuační podložka EVS s třemi popruhy a kovovou přezkou LU600046


NÁVOD K POUŽITÍ



1. Příprava lůžka pro evakuační podložku


- Položte podložku na rošt lůžka.
- Ujistěte se, že je viditelný štítek. Šipky znázorňují správné umístění podložky směrem k hlavě nebo nohám ležícího.
- Ujistěte se, že je **viditelný štítek**, a umístěte matraci na horní stranu evakuační podložky.
- Pripevněte rohové pásky evakuační podložky na rohy matrace.

Poznámka: Maximální rozměry použité matrace jsou 200 x 90 cm. Lůžko následně ustelte obvyklým způsobem.

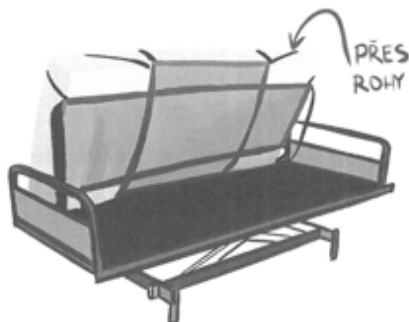

2. Příprava ležícího pro evakuaci

- Umístěte polštář pod pacientovu šíji, abyste tak zajistili dostatečnou ochranu a podporu oblasti krku evakuované osoby.
- Pokud je riziko, že by u evakuované osoby mohlo dojít k poranění hrudníku, pevným utažením jističího popruhu umístěte evakuované osobě na oblast hrudníku polštář pro snížení tlaku na tuto oblast. Až poté zajišťovací popruh náležitě utáhněte.

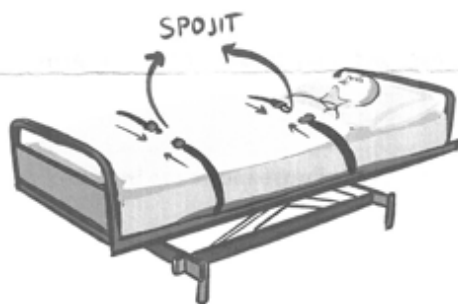

- Nyní propojte spony protilehlých popruhů přes matraci a evakuovanou osobu a utáhněte. Utažení popruhů **nesmí** evakuované osobě způsobit zranění.

- Upravte výšku lůžka do nejnižší možné polohy.

Nyní je pacient připraven na evakuaci.

3. Přemístění pacienta z lůžka

- Pokud se rozhodnete pro evakuaci tažením za popruhy v nožní části matrace, posuňte matraci s ležícím pod úhlem 45° tak, abyste měli neustálou kontrolu nad rychlostí pohybu matrace z lůžka na zem, aby nedošlo k poranění ležícího.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není tímto způsobem povolena evakuace osob s hmotností nad 150 kg.

Pro bezpečnou evakuaci výrobce doporučuje, aby přesunutí pacienta z lůžka na zem **bylo prováděno ve dvou osobách**

- **1. osoba** u hlavy pacienta zajišťuje stabilitu hlavy a krku a zároveň kontroluje rychlost sesunutí matrace na zem, zatímco...
- **2. osoba** zajišťuje stažení matrace s pacientem dolů z lůžka na zem.



**Evakuace
ve dvou lidech**

EVAKUAČNÍ PODLOŽKA - Příprava lůžka a samotná evakuace



4. Evakuace pacienta na bezpečné místo

Tažením za popruhy přemístíte podložku spolu s matrací z pokoje na místo stanovené v evakuačním plánu. Pro bezpečnou manipulaci s pacientem je doporučena obsluha ve dvou osobách.

Pro snížení tření a zvýšení komfortu a efektivity evakuace nadlehčete při tažení rohy matrace. Pro snadnější zatočení kolem rohů můžete bok matrace odlehčit pomocí postranních úchytů.

Upozornění: Mějte na paměti, že koberec na podlaze výrazně zvyšuje tření a evakuace je tak mnohem obtížnější.



Evakuace po schodech ve dvou lidech



5. Evakuace po schodech

Pokud je zapotřebí evakuovat po schodech, je výrobcem doporučeno toto provádět **za účasti dvou osob**.

Evakuace osob o vyšší hmotnosti může pro bezpečný transport vyžadovat více osob obsluhy.

Upozornění: Transport po schodech provádějte co nejplynuleji, zvláště pak v počáteční fázi při překonávání prvního schodu, kdy je zvýšený tlak na tělo pacienta.

6. Pravidelně kontrolujte neporušenost a celistvost evakuační podložky. Při porušení materiálu vadnou podložku zlikvidujte a nahraďte novým kusem.

7. V případě potřeby údržby a čištění postupujte dle instrukcí uvedených na štítku.

8. Evakuační podložku skladujte na suchém a chladném místě.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím evakuační podložky si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte všem uvedeným instrukcím. Pokud některým pasážím obsluhy nebo upozornění nerozumíte, kontaktujte svého dodavatele. Pokud je evakuační podložka nesprávně umístěna nebo používána v rozporu s návodem k obsluze, může dojít k ublížení na zdraví evakuované osoby nebo obsluhy. Nesprávným použitím může rovněž dojít k poškození samostatné evakuační podložky.

- NEPOUŽÍVEJTE evakuační podložku, pokud je poškozená nebo chybějí některé části výrobku.
- NEPŘEKRAČUJTE maximální povolené zatížení podložky.

KONTRAINDIKACE

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v případě, že pacient trpí vnějším poraněním nebo poraněním krku/páteře.



praní max. na 80° v sušičce na nízké teploty



teploty



nepoužívat
bělidlo



nežehlit



viz návod